


Material : Außenstoff 35cm x 20 cm
 Innenstoff 35cm x 20 cm
 Gummiband 40 cm
 ggf. Draht 10 cm

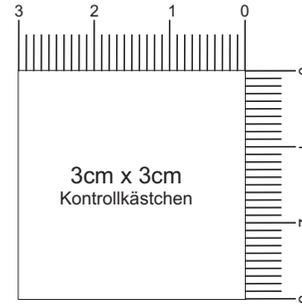


Mundschutz
 mouth protection
 Nahtzugabe ist nicht enthalten! /
 Seam allowance is not included
 on the pattern pieces!
 4 x zuschneiden / cut out
 © woruwo.de

KURZANLEITUNG




1

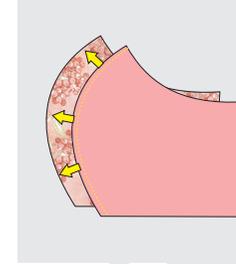


Schneide die Schnittteile 4 x aus. 2 mal Außen- und 2 mal Innenstoff.
 Danach werden sie jeweils rechts auf rechts an dem langen Bogen zusammengenäht.

2

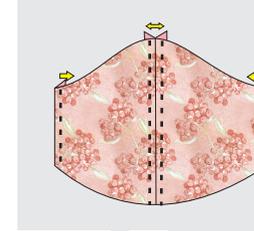


Im zweiten Schritt wird die Nahtzugabe in der Mitte auseinander geklappt und beidseitig abgesteppt.
 Die Ränder werden ebenso umgenäht. (Außen- und Innenteil)

3

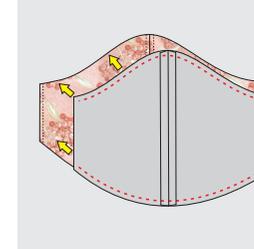

In Schritt 3 werden Außen- und Innenteil rechts auf rechts zusammengenäht. Beidseitig wird eine Öffnung gelassen. Dann kann die Maske durch eine Öffnung gewendet werden.

4

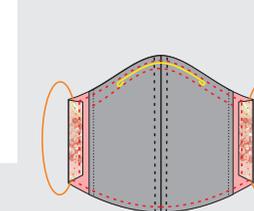

Im Schritt 4 kann bei Bedarf ein ca.10 cm langer Draht im oberen Nasenbereich eingefügt werden. Die Enden des Drahtes werden umgebogen. Dann wird oben 2x (der Draht liegt mittig) und unten 1x abgesteppt.
 Nun wird der Außenstoff auf beiden Seiten ca. 1,5 cm nach innen umgenäht. Dabei wird jeweils ein Gummiband (20cm zum Ring genäht) dazwischen gelegt. Die offenen Seiten bieten die Möglichkeit einer separaten Einlage.



MUNDSCUTZ
 MOUTH PROTECTION



© woruwo.de